

zacházet jako s biologickým odpadem podle zákonů platných v příslušné oblasti. Pokud jsou ale implantáty odesílány společností Sweden & Martina s žádostí o provedení testování, je potřeba dodržovat protokol zveřejněný na adrese www.sweden-martina.com.

15. RUČENÍ ZA VADNÉ VÝROBKÝ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vynikající péče o pacienta a pozornost k jejich potřebám jsou nezbytné podmínky pro provedení úspěšné implantace. Je proto nezbytné pečlivě vybrat pacienta, informovat ho o základních rizicích a povinnostech spojených s léčbou, motivovat je ke spolupráci se stomatologem, aby bylo možné dosáhnout dobrého výsledku léčby. Pacient tedy musí udržovat dobrou úroveň hygieny dutiny ústní - což bude potvrzeno v rámci pravidelných přezkoušení a kontrolních návštěv - a toto musí být zaručeno a zdokumentováno, stejně jako pokyny a předpisy před chirurgickým zákrokem i po něm. Pokyny sestavené společností Sweden & Martina jsou k dispozici v průběhu léčby a byly akceptovány pro stomatologickou praxi. Tyto pokyny musejí být dodržovány a používány v průběhu všech fází péče: od stádia zjišťování anamnézy pacienta, až po přezkoušení po chirurgickém zákroku. Záruka se vztahuje výhradně na vady, které lze vztáhnout na výrobu a za předpokladu, že bude vadný výrobek zaslán - označen příslušným číslem výrobku a kódem šarže - před uplynutím záruční lhůty. Záruční podmínky lze nalézt na adrese www.sweden-martina.com. Věrnostní servis je soubor služeb nabízený zákazníkům používajícím implantační systémy Sweden & Martina, který zahrnuje možnost výměny implantátů za snížené ceny, implantátů, které selhaly, anebo které jednoduše nelze použít, protože došlo k jejich otevření a/nebo nesprávné manipulaci. Podmínky, které řídí věrnostní servis, jsou rovněž k dispozici na stránkách www.sweden-martina.com.

16. DATUM A PLATNOST NÁVODU K POUŽITÍ

Tento návod k použití je platný a účinný od dubna 2013.

Legenda k symbolům

	Pozor! Viz návod k použití
	Číslo šarže
	Kód
	Sterilizováno pomocí ionizačního záření
	Datum spotřeby, po kterém nesmí být výrobek používán
	Nepoužívejte opakovaně, výrobek na jedno použití
	Výrobce
	Konzultujte návod k použití
	Nepoužívejte výrobek, pokud je balení poškozené
	Označení shody CE
	Federální zákon USA dovoluje prodávat tento výrobek pouze lékařům nebo na jejich objednávku


Obrázek 01



Napojení s dvojitým vnitřním osmihranem:

- koronální osmihran, na který jsou aplikovány torzní síly;
 - hlubší osmihran pro přesné polohování protetikých komponent.
- Lepší stabilita a správné rozložení mastikacích sil. Tolerance pro protetické řešení v řádu mikrometrů.

Obrázek 01 - horní pohled

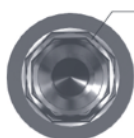

Koncová objímka s napojením s dvojitým vnitřním osmihranem.

Obrázek 02



Obrázek 03



Obrázek 04



Obrázek 05



Tabulka 01

Popis	Balení	Definice ve smyslu směrnice 93/42	Pravidlo	Třída rizika
Implantační fixtury pro stomatologické použití, jsou součástí implantačního systému Global	Sterilní, jednorázové balení. Fixtury se dodávají v sadě s krycím šroubem a upevňovacím prvkem, takže umožňují i odběr otisku a použití pro účely provizorního abutmentu	Implantační zařízení určené pro dlouhodobé použití (více než 30 dnů)	8	IIb
Krycí šrouby	Prodávají se buď v sadě s příslušnými doplňky, anebo samostatně (jednorázové a sterilní balení). Barvení galvanickým procesem s použitím barevných kódů systému (3,80 mm ZELENÁ, 4,30 mm MODRÁ, 4,80 mm LILA, 5,50 mm SVĚTLE MODRÁ)	Implantační zařízení určené pro dlouhodobé použití (více než 30 dnů)	8	IIb
Upevňovací prvky pro fixtury Global. Plní i funkci přenosu otisku a provizorního abutmentu	Prodávají se kompletní s příslušnými upevňovacími šrouby a předmontované s fixturami, v jednorázovém, sterilním balení). Prodávají se i samostatně, v sadě s upevňovacími šrouby. Barvené ŽLUTÉ galvanickým procesem	Upevňovací prvky i otiskovací systém jsou chirurgicky invazivní zdravotnické prostředky, jejichž trvanlivost může přesahovat 30 dnů (provizorní použití)	8	IIb

Tabulka 02

Ø 3,80	ZELENÁ
Ø 4,30	MODRÁ
Ø 4,80	LILA
Ø 5,50	SVĚTLE MODRÁ

sweden & martina

Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (Padova) - Italia
Tél. +39 049.91.24.300 - Fax + 39 049.91.24.290
e-mail : info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com